



**14 cm (5,5 in.) Piranha traumesaks**

REF TM-705

**14 cm (7,25 in.) Piranha traumesaks**

REF TM-707



TyTek Medical Inc.  
8904 Beckett Rd. | West Chester, OH 45069, US  
[www.tytekmedical.com](http://www.tytekmedical.com)



EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

## Bruksanvisning

Piranha-traumasaksen er utformet for å assistere ved fjerning av klær for å gi tilgang til sårområder, og for å klippe gasbind etter behov under behandling. For å bruke produktet plasseres tommelen i det lille hullet på saksen og langfingeren og ringfingeren i det store hullet på saksen. Når du klipper klær, plasseres saksen med den stumpe, foldede tuppen mot pasienten. Ta tak i klærne med den ledige hånden for å lette klippingen. For å klippe med saksen brukes fingrene til å åpne og lukke saksen, mens klippehånden skyver saksen framover. Saksen må kun gjenbrukes etter at den er nøye rengjort (se avsnittet Rengjøring og oppbevaring). Bytt ut saksen, når den har blitt sløv eller ikke lenger fungerer som den skal. Saksen er IKKE STERIL, og er ikke beregnet for bruk ved skjæring i levende vev.

Merk: Hvis du trenger ytterligere veiledning for å bruke dette produktet, må du kontakte helsepersonell. Enhver alvorlig hendelse som oppstår i sammenheng med enheten, skal rapporteres til produsenten og til vedkommende myndighet der brukeren/pasienten er etablert.

## Rengjøring og oppbevaring

I henhold til produsentens anbefaling, etter at synlige forurensninger er fjernet fra enheten, brukes et alkohol-, klor- eller hydrogenperoksidbasert rensmiddel. Sørg for at tider for våt kontakt er i samsvar med kontaminanten. Tørk saksen etter at den er rengjort.

Oppbevar Piranha-saksen ren og tørr.

## Begrenset garanti

Produktene og komponentene i denne pakningen er medisinsk utstyr, og er kun beregnet for bruk som anvist. TyTek Medical Inc. garanterer at produktene og komponentene ikke har defekter i materialene og utformingen, og er kun egnet for bruk som medisinsk utstyr for det spesifikke formålet som er beskrevet i bruksanvisningen i en periode på 12 måneder fra forsendelsesdatoen fra TyTek Medical Inc. All bruk av produktene eller komponentene utover den spesifiserte bruken som er beskrevet i denne bruksanvisningen ugyldiggjør denne begrensede garantien. UTOVER DET SOM ER LAGT FRAM HER, GIR TYTEK MEDICAL INC. INGEN ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR PRODUKTENE ELLER KOMPONENTENE, OG FRASKRIVER SEG SPESIFIKT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Denne varen skal kun selges og brukes i henhold til vilkår og betingelser på [www.tytekmedical.com](http://www.tytekmedical.com)